



NOME DEL PRODOTTO PERSECON® HDS E

MATERIALE E CONFEZIONAMENTO

Le lenti a contatto rigide gaspermeabili **PERSECON® HDS E** contengono **fluorosilicone-acrylate (Paragon HDS)** con l'aggiunta di **benzophenone** un bloccante dei raggi UV. Le lenti **PERSECON® HDS E** hanno una leggera tinta verde per facilitare la manipolazione. La tinta contiene **D&C green No 6**.

Le lenti **PERSECON® HDS E** sono confezionate in singoli flaconi di vetro sigillati, contenenti **polyhexanide**. Non utilizzare se il sigillo di sicurezza risulta manomesso.

INDICAZIONI D'USO

Le lenti **PERSECON® HDS E** sono destinate all'uso diurno per la correzione ottica in persone che non presentano patologie oculari, con un lieve o moderato astigmatismo. Le lenti **PERSECON® HDS E** sono inoltre destinate alle persone che richiedono una correzione addizionale per medio o alto astigmatismo o per cheratocono.

CONSIGLI PER L'USO E LA SOSTITUZIONE

USO DIURNO - (meno di 24 ore durante lo stato di veglia). La durata del periodo d'uso deve essere incrementata gradualmente, fino al raggiungimento del massimo consigliato. LE LENTI DEVONO ESSERE TOLTE PRIMA DI DORMIRE.

Nell'interesse del mantenimento della salute e la sicurezza dei vostri occhi, il tempo massimo d'uso giornaliero dovrebbe essere stabilito dallo specialista di fiducia.

CIBA VISION raccomanda di sostituire le lenti **PERSECON® HDS E** regolarmente ogni 12-18 mesi o con maggiore frequenza, come indicato dallo specialista di fiducia.

MANIPOLAZIONE DELLE LENTI

Le istruzioni dettagliate per l'inserimento e la rimozione delle lenti a contatto dovrebbero essere fornite dallo specialista di fiducia.

Lavare e asciugare sempre le mani prima di manipolare le lenti. Verificare che la lente sia la lente corretta per quell'occhio. Esaminare le lenti prima di indossarle e non utilizzarle se sono danneggiate.

Per indossare la lente metterla sulla punta di un dito e, guardando dritto davanti a sé, tenere aperte le palpebre e applicare la lente direttamente al centro dell'occhio. Rilasciare le palpebre.

Prima di rimuovere le lenti, verificare che le mani siano completamente asciutte. Aprire bene gli occhi, in modo tale che le palpebre non coprano la lente. Mettere un dito sull'angolo esterno dell'occhio e, guardando fisso con gli occhi ben aperti, tirare verso l'esterno e leggermente verso l'alto, tendendo le palpebre. A questo punto, battere le palpebre. Le palpebre dovrebbero scivolare sotto il bordo della lente e sollevarla dall'occhio.

Lo specialista di fiducia dovrebbe fornirti tutte le informazioni dettagliate su come manipolare una lente decentrata.

Non usare mai pinzette, ventose, oggetti appuntiti o le unghie per rimuovere le lenti dai portalenti o dagli occhi.

SE CI SI ADDORMENTA INDOSSANDO LE LENTI

Se ci si addormenta accidentalmente per un breve periodo indossando le lenti, è improbabile che si manifestino effetti avversi.

Tuttavia al risveglio è possibile avvertire lenti come secche, disidratate; per porvi rimedio è sufficiente battere le palpebre più volte.

MANUTENZIONE DELLE LENTI

- LA CORRETTA MANUTENZIONE DELLE LENTI È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA
- PULIRE e SCIACQUARE le lenti, per rimuovere agenti contaminanti dalla superficie. Inoltre le lenti possono richiedere una pulizia enzimatica periodica per rimuovere le proteine.
- DISINFETTARE le lenti ad ogni rimozione, per distruggere germi pericolosi e per un uso sicuro e confortevole.
- Lo specialista di fiducia sceglierà il sistema per la manutenzione delle lenti più idoneo. CIBA VISION raccomanda l'utilizzo dei prodotti seguenti con le lenti **PERSECON 92E**:

Soluzioni disinfettanti al perossido di idrogeno
AOSEPT® Plus

Soluzioni per la pulizia e la disinfezione chimica a freddo
SOLOCARE® AQUA

Soluzioni per il risciacquo

SoftWear® Saline Plus

Compresse per la rimozione delle proteine
UNIZYME™

Gocce lubrificanti e umettanti

AQuify®

- Non IMMERGERE le lenti in nessuna soluzione per la manutenzione con base alcolica.
- Consultare lo specialista di fiducia prima di utilizzare qualsiasi altro prodotto per la manutenzione delle lenti.
- Non alternare o mescolare prodotti per la manutenzione delle lenti appartenenti a sistemi diversi.
- Utilizzare soltanto prodotti per la disinfezione di lenti a contatto rigide gas permeabili, attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore.
- NON UTILIZZARE IL CALORE NÉ PRODOTTI FORMULATI PER LENTI MORBIDE
- NON UTILIZZARE PRODOTTI CONTENENTI **BENZALKONIUM CHLORIDE**.

Ricordare sempre quanto segue:

- Lavare, risciacquare ed asciugare sempre le mani prima di manipolare le lenti a contatto.
- Non conservare mai le lenti per tutta la notte solo nella soluzione salina. La soluzione salina NON protegge le lenti dai germi né gli occhi da eventuali infezioni.
- Non riutilizzare la soluzione già usata contenuta nel portalenti.
- Non utilizzare mai soluzioni dopo la data di scadenza.
- Risciacquare ogni giorno il portalenti con soluzione salina sterile o soluzione unica e, se indicato, lasciarlo asciugare all'aria. Ciò contribuirà ad evitarne contaminazione e gravi lesioni oculari.
- Sostituire regolarmente il portalenti.

SE NON SI PORTANO LE LENTI PER ALCUNI GIORNI, seguire le istruzioni del programma di disinfezione e, se necessario, pulire e disinfettare di nuovo le lenti, prima di rimetterle.

QUANDO NON UTILIZZARE LE LENTI

Le lenti non devono essere indossate in concomitanza con alcune condizioni di salute o ambientali. Le condizioni che possono interferire con l'uso sicuro delle lenti a contatto sono:

- Allergia, infiammazione, infezione o irritazione all'interno o intorno all'occhio o alle palpebre.
- Periodi di cattiva salute, come forti raffreddori o influenza.
- Uso di alcuni farmaci, inclusi i farmaci oftalmici.
- Lacrimazione insufficiente (secchezza oculare)

- Ambienti eccessivamente asciutti o polverosi, che possono rendere non confortevole l'utilizzo delle lenti.
 - Sport acquatici senza l'uso di occhiali da piscina
- Consultare lo specialista di fiducia per queste o altre condizioni.

PROBLEMI POSSIBILI

Anche se le lenti a contatto offrono numerosi vantaggi a chi le indossa, è possibile che si manifestino inconvenienti, riconoscibili in una o più delle seguenti condizioni:

- Sensazione di corpo estraneo.
 - Lenti fastidiose.
 - Rossore oculare.
 - Sensibilità alla luce.
 - Bruciore, fitte, prurito o lacrimazione accentuata.
 - Riduzione dell'acuità visiva.
 - Arcobaleni o aloni intorno alle luci.
 - Aumento della secrezione oculare.
 - Fastidio/dolore.
 - Secchezza oculare grave o persistente.
- Questi sintomi, se ignorati, possono provocare complicanze gravi.

CHE COSA FARE SE SI MANIFESTA UN PROBLEMA

Se si verifica uno dei sintomi precedenti:

- **RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LALENTE (O LE LENTI)**.
- Se i fastidi o i problemi cessano, indossare una lente nuova.
- Se la (e) lente(i) è in qualche modo danneggiata, NON riutilizzarla(le), ma sostituirla(le) con una lente(i) nuova o consultare lo specialista di fiducia.
- Se la (e) lente(i) è(sono) sporca(che) o presenta ciglia o altri corpi estranei, o se il problema scompare e la(e) lente(i) non appare danneggiata, è sufficiente sciacquarla bene e disinfettarla prima di indossarla nuovamente.
- Se i sintomi citati persistono dopo l'inserimento della(e) lente(i) nuova(e), rimuovere la(e) lente(i) **IMMEDIATAMENTE** e consultare tempestivamente il proprio specialista di fiducia. Potrebbe essere presente una condizione seria quale infezione, ulcera corneale o irite. Queste condizioni potrebbero progredire rapidamente, provocando la perdita permanente della vista. Reazioni meno gravi quali abrasioni, colorazioni epiteliali e congiuntiviti batteriche, devono essere affrontate e trattate tempestivamente per evitare complicanze.
- La secchezza occasionale può essere risolta ammiccando più volte o utilizzando gocce lubrificanti o umettanti come Aquify®. Se la secchezza persiste consultare lo specialista di fiducia.
- Se una lente aderisce (smette di muoversi) applicare alcune gocce di soluzione lubrificante e aspettate finché la lente non inizia a muoversi liberamente nell'occhio prima di cercare di rimuoverla. Se la lente continua ad aderire, contattare **IMMEDIATAMENTE** lo specialista di fiducia.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il rischio di un possibile inconveniente può essere ridotto riconoscendo i segni e facendo riferimento alla sezione precedente "Che cosa fare se si manifesta un problema". È fondamentale una corretta manutenzione e il regolare rimpiazzo del portalenti. L'utilizzo di lenti a contatto aumenta il rischio di infezioni oculari. Il fumo aumenta il rischio d'insorgenza di ulcera corneale per i portatori di lenti a contatto.

COSE IMPORTANTI DA RICORDARE

- Controllare regolarmente i propri occhi per assicurarsi che abbiano un aspetto sano, non diano fastidio e che la visione sia nitida.

- Si raccomanda ai portatori di lenti a contatto di recarsi regolarmente dal proprio specialista come indicato.
- Non utilizzare lenti o prodotti per la manutenzione dopo la data di scadenza.
- In condizioni di poca luce i portatori di lenti colorate potrebbero riscontrare una visione ridotta degli oggetti a basso contrasto.
- Annotare la corretta gradazione della lente per ciascun occhio.
- Prestare attenzione all'uso di saponi, lozioni, creme, cosmetici o deodoranti, poiché possono provocare irritazione se vengono a contatto con le lenti.
- Inserire le lenti **prima** di truccarsi e rimuoverle **prima** di struccarsi.
- Evitare l'utilizzo di prodotti spray vicino agli occhi quando s'indossano le lenti, poiché potrebbero provocare irritazione.
- Consultare lo specialista di fiducia per l'utilizzo delle lenti durante le attività sportive, incluso il nuoto.
- In caso di esposizione a vapori nocivi o irritanti, rimuovere le lenti.
- Le lenti a contatto non devono mai entrare in contatto con acqua non sterile (inclusa l'acqua di rubinetto e saliva) in quanto possono verificarsi contaminazioni microbiche che potrebbero provocare danni permanenti agli occhi.
- Informare il proprio datore di lavoro che s'indossano le lenti a contatto, in particolare se il lavoro prevede l'impiego di dispositivi di protezione oculare.
- Non indossare le lenti **PERSECON® HDS E** mentre si dorme.



Fabbricante:
CIBA VISION Corporation
Duluth, Georgia, 30097, USA



Mandatario per l'UE:
CIBA VISION GmbH
63868 Grosswallstadt, Germania

Distribuito da:
CIBA VISION Srl
Via E. Mattei, 11
30020 Marcon (Ve)

Proof 4 del 03/08/2007

Abbreviazioni per le specifiche delle lenti:

BC	Raggio Base
PWR	Potere
DIA	Diametro
E	Eccentricità

Queste informazioni per l'uso sono state preparate esclusivamente per il mercato italiano e riflettono quanto prescritto in questo mercato. La prescrizione in altri mercati può variare.

La fornitura delle lenti è soggetta a disponibilità.

CIBA VISION™

Shared Passion for Healthy Vision and Better Life